

**Dieser Mund-Nasen – Schutz ist nicht geeignet als medizinische Schutzmaske, noch als persönliche Schutzausrüstung (PSA) im Arbeitsschutz, d.h. sie dient nicht zum Schutz vor Infektionen.**

**Vielmehr unterbindet der MNS, dass Tröpfchen vom Träger durch die Luft fliegen können – beim ungeschützten Sprechen, Husten und Niesen können diese im Umkreis von bis zu 1,50 Metern weit verteilt werden.**

**Vor erstem Gebrauch waschen.**

### **Benutzen des MNS**

- 1. Reinigen Sie zuerst die Hände gründlich.**
- 2. Setzen Sie die MNS über den Mund und die Nase. Achten Sie darauf, dass alles gut abgedeckt ist.**



- 3. Beim Absetzen ist darauf zu achten, dass nicht die Vorderseite des Mundschutzes angefasst wird, da sich dort die Viren befinden können.**

**Einfach an den Bändern abziehen.**

**Nasse oder feucht gewordenen Masken bitte wechseln und getragene Masken waschen.**

**Achtung!**

**Die Hände sollten vor und nach dem Absetzen der MNS oder bei sonstiger**



**Berührung mit Seife gründlich gewaschen werden.**